



head Intubate DUO White

1

Tag All Up[®] Head Intubate Duo White ud af posen.

Orienter puden så ventilerne vender opad.


Fjern og læs instruktioner placeret på selve puden.



2

Pump den nederste pude med luft, så den er helt fyldt.

Dette giver puden dens højde.

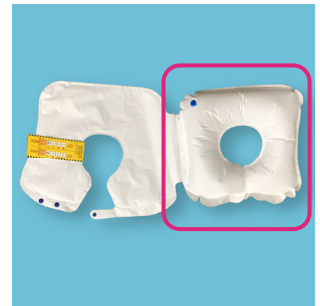

3

Pump den øverste pude med luft, så den er ca. ¾ fyldt.

Den øverste pude skal være blød og eftergivende, dette giver den øverste pude dens aflastende egenskaber.



4

Se det gule skema for orientering af puden (A).

Når patienten er placeret i bugleje, føres puden ind fra siden, med slangerne placeret i den centrale åbning.

Den øverste bløde pude skal være opad mod patientens ansigt.



5

Åbningen i den øverste pude lukkes med de monterede trykknapper.

VIGTIGT

Den øverste del af All Up[®] Intubate Duo må IKKE være hårdt oppumpet. For optimal lejring skal den være BLØD og eftergivende, hvilket giver aflastning.

Kontroller puden regelmæssigt i overensstemmelse med kliniske retningslinjer.

