

seat **all**  **flexi**

Den trykreducerende siddepude til FlexiSeal for:
Forebyggelse og behandling af tryksår.

DK


Declaration of Conformaty (CE)

The company Levabo ApS, Sverigesvej
20A, 8660 Skanderborg, declares that the
products are designed and manufactured in
accordance with the technical documentation
and legal requirements.

LEVABO[®]
medical cushions

Levabo ApS
Sverigesvej 20
8660 Skanderborg DK

Quick guide

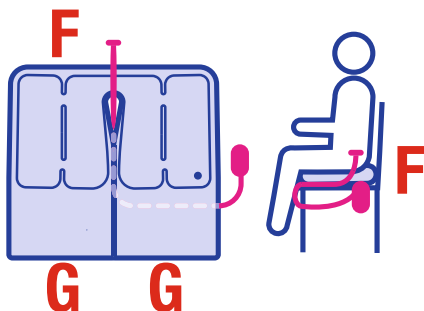

Puden åbnes og der fyldes luft i til indikatorbåndet brister. Se oppumpning og justering s.3.

Store patienter skal ofte have lidt mindre luft i og lette patienter skal måske have lidt mere luft i.

Den lukkede del af puden (F) lægges så langt tilbage mod ryglænet i stolen/kørestolen som muligt. Ventilen skal vende opad for evt justering når patienten sidder på puden.

Den åbne del med de to vinger (G) peges frem og følger, hvor patientens ben kommer til at være.

Patienten skal ikke have ble på, men sættes uden underbeklædning på puden.


Tjek at FlexiSeal-slangen ligger nede mellem de to vinger (G) og har frit afløb.

Der er en tryklås mellem de to vinger af puden, som kan knappes, når flexisealen ligger som den skal.

Patienten kommer til at sidde, så flexisealen er fri fra tryk, hvilket mindsker både ubehag og lækage.

Tip før oppumpning

**Indsæt pumpen i ventilen.
Indsæt lukke-proppen
i hullet på pumpe-håndtaget.
Pump op.**

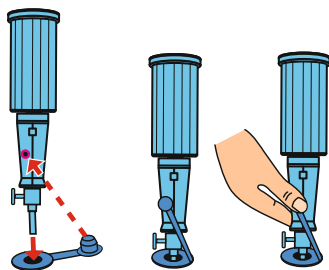

Er der ingen hul, kan du holde lukke-proppen fast med en finger.

Garanti

* Garantien er begrænset og dækker kun produktionsfejl. Ved ukorrekt anvendelse af produktet bortfalder garantien. Normal slitage er udelukket fra garantien.

VIGTIGT:



Seat All Flexi® må IKKE være hårdt oppumpet. (Figur 5)
For optimal og behagelig positionering skal den være blød og eftergivende, IKKE hård.
Kropsdelen skal være fri af underlaget. Luk evt. luft ud af puden til den føles behagelig.



Kontroller dagligt at løftehøjden er korrekt.

Hvis puden oppumpes uden Stop Up bånd, er det vigtigt at følge ovenstående retningslinjer.



Produktbeskrivelse

Seat All Flexi® pudern er designet til forebyggelse og behandling af trykkskader.

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig. Ved selv de mindste bevægelser stimulerer Seat All Flexi® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Seat All Flexi® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varme-transporterende, blød, behagelig og elastisk.

Indikationer / Formål

Dekubitus profylakse og behandling.
Eksisterende tryksår.

Tryksårs risiko.

Anvendelses risici / Kontraindikationer

Seat All Flexi® kan bruges i stole eller senge med eller uden justerbare overflader.

Når du bruger Seat All Flexi® i stole eller senge med justerbare overflader, sørg for at følge retningslinjer for at undgå forskydning/shear.

Tilladte anvendelsesområder / placeringer

Seat All Flexi® kan bruges overalt på kroppen.

Seat All Flexi® kan bruges til samme patient i længere tid.

Seat All Flexi® er designet som et "en-patient" produkt og er derfor ikke til genanvendelse på en anden patient.

En-patient brug eliminerer risikoen for en mulig bakteriel spredning mellem patienterne.

Oppumpning og justering

Se piktogrammer på bagsiden

Seat All®-puderne er designet til at forebygge og behandle tryksår.

Puderne er til en-patient brug.

Sørg for, at det behandlede område undersøges regelmæssigt og i overensstemmelse med gældende kliniske retningslinjer.

Når du bruger Seat All® sammen med andre produkter, læs venligst instruktionerne for de andre produkter.

Fjern forsigtigt puden fra den ydre emballage. Lad det omsluttende Stop Up bånd sidde på puden.

Oppumpning:

Hold ventilen mellem finger og tommel (D), pres den lille blå pumpe dyse (A) ned i ventilen til den sidder fast. Indsæt pumpen eller pusterøret (som følger med produktet) (B) i pumpens dyse og start oppumpning (figur 1). Ved brug af en Levabo manuel pumpe er pumpedysen (A) ikke nødvendig, da denne pumpe passer direkte ind i ventilen.

Pump op op til det vejledende niveau. Bemærk venligst, at puden leveres med et omsluttende papirbånd (Stop Up-bånd), der brister (figur 3), når puden er oppumpet til det vejledende niveau.

Check løftehøjden (fig 5) Pudens må IKKE være hårdt oppumpet den skal være blød og eftergivende for optimal aflastning. Kropsdelen skal være fri af underlaget.

Puden skal justeres til et niveau, der passer til DIN patients behov.










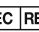
Når du har pustet puden op og justeret til det ønskede niveau, lukkes ventilen (figur 4).

Det er vigtigt at proppen presses helt ned i ventilen. Klæb det blå cirkulære ventildække (C) over ventilen (figur 6).

Lukke luft ud af puden:

Hold ventilen mellem finger og tommel (E), indsæt den lille blå pumpe dyse (A) for at lukke luft ud. Ved brug af en Levabo-manuel pumpe er pumpedysen (A) ikke nødvendig, da en udluftningsknap er indbygget i pumpen (E).

DK

Forklaring af symboler på emballagen					
	Læs brugsanvisningen		Udløbs dato		Konformitetserklæring
	Produktions nummer		En-patient produkt		Materiale i emballagen
	Producent		Fremstillings dato		Produkt nummer
	Autoriseret repræsentant i EU				

