




## Installation af Turn All® systemet på sengen

# 1

Fjern madrassen fra sengen (figur 1).

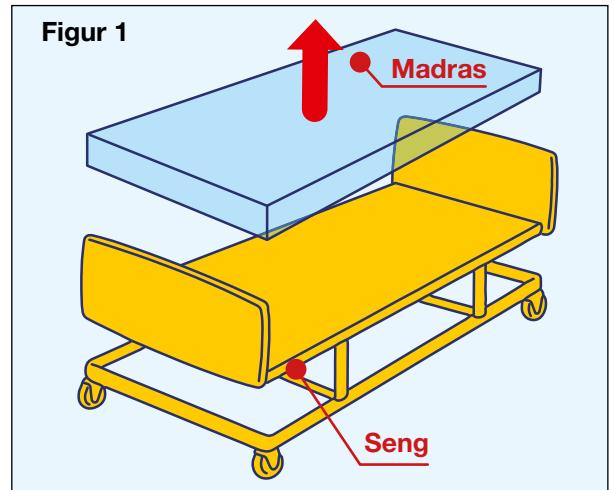


# 2

Placer Turn All® systemet (A) på sengebunden.

Orienter systemet således at slangetilkoblingen (B) er i fodenden af sengen (figur 2).


Fastgør Turn All® systemet til sengebunden ved hjælp af stropperne (C) på overtrækket (figur 2).

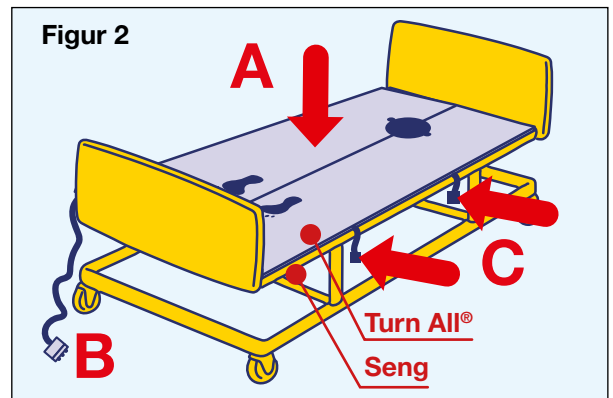

# 3


Læg madrassen tilbage i sengen ovenpå Turn All® systemet (figur 3).

Turn All® pumpen (D) placeres på sengegavlen i fodenden ved hjælp af de to bøjler på bagsiden af pumpen (figur 3).

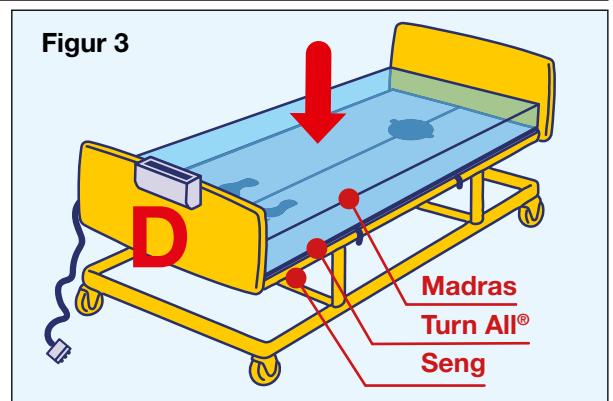

# 4

Sæt slangetilkoblingen (B) i pumpen (D) (figur 4).

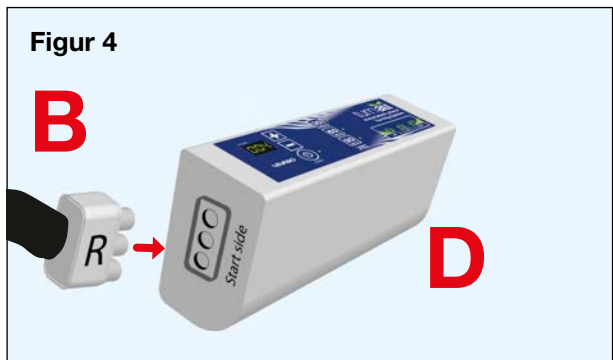




### Indstilling og start af Turn All® systemet

# 1

Tilslut netledningen til pumpen (figur 1).

Tilslut netledningen til lysnettet.

Figur 1

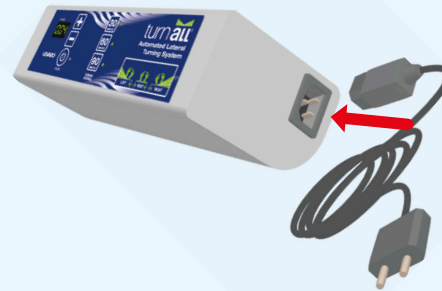


# 2

Tænd pumpen på "POWER" knappen (D) (figur 2).

Indstil timeren "G" med knapperne "+" og "-".

Tallet i timeren "G" angiver hvor mange timer systemet skal køre automatisk.

Figur 2

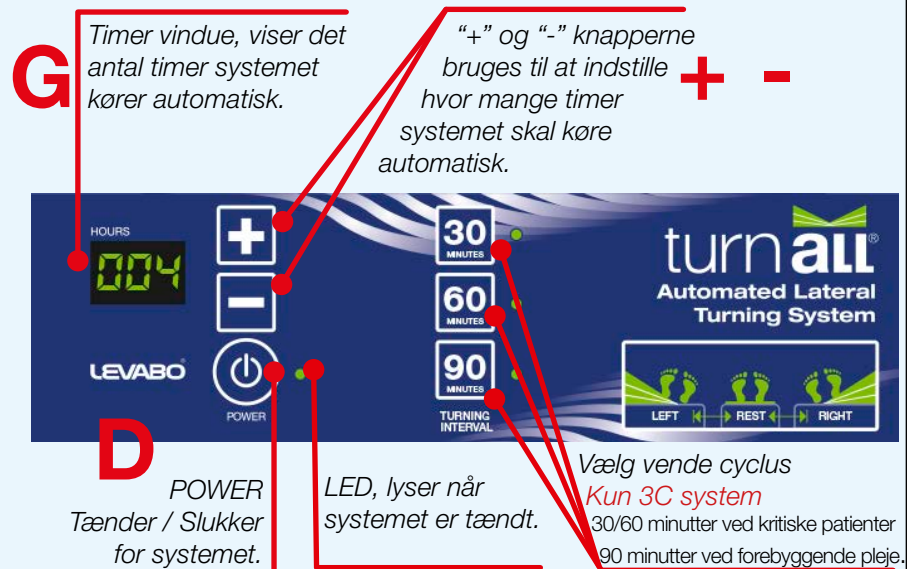


# 3

Turn All® systemet kører nu automatisk. Den ene side af madrassen løftes nu i 30/60/90 minutter (1C System 90 minutter), derefter ligges der vandret i 5 minutter i overgangsfasen, derefter løftes den anden side i 30/60/90 minutter (1C System 90 minutter), derefter ligges der vandret i 5 minutter i overgangsfasen.


Denne sekvens gentages i det antal timer der er indstillet i timeren "G", hvorefter der returneres til at ligge vandret. Se illustration side 5 i brugsanvisningen.

**VIGTIGT.** Når systemet ikke er i brug efter automatisk kørsel, slukkes systemet på POWER knappen (D), og derefter på stikkontaktentil lysnettet. Slangetilkoblingen (B) frakobles pumpen (C) (figur 3). Dækslet (E) må IKKE monteres på slangetilkoblingen (B) (figur 4).

Figur 3

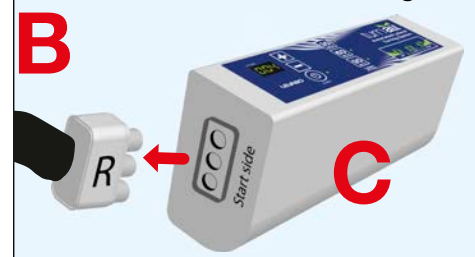

Figur 4

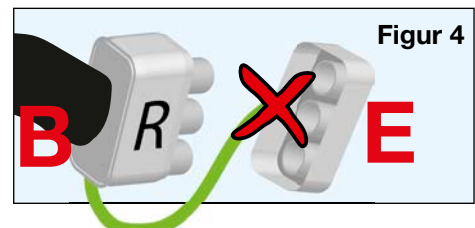


### Brug af Turn All® systemet til statisk løft


# 1

Ønskes Turn All® systemet anvendt til et statisk løft som en skråpude, vendes slangetilkoblingen (B) i henhold til den side som ønskes løftet.

Slangetilkoblingen (B) er markeret med bogstaverne "R" for højre og "L" for venstre.

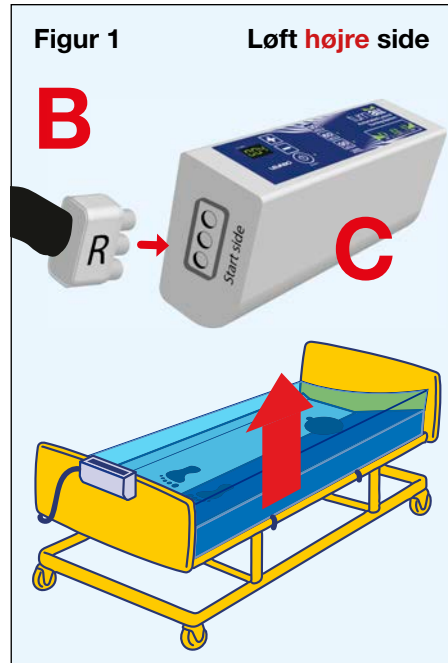

Ønskes løftet startet i højre side af sengen, set fra fodenden, vendes slangetilkoblingen med bogstavet "R" mod teksten "Start side" på pumpen, som vist på (figur 1).


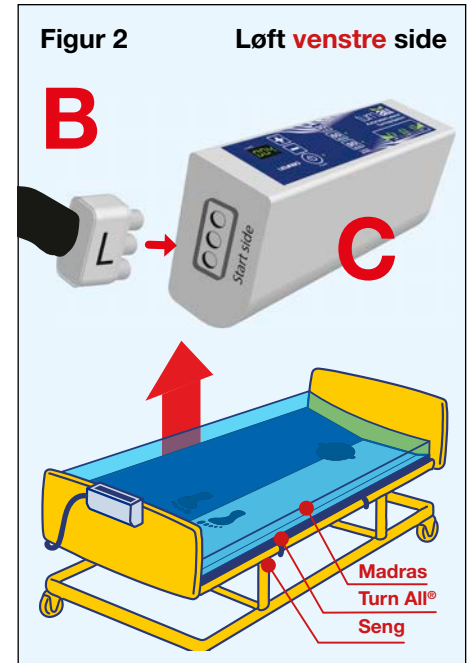


Ønskes løftet startet i venstre side af sengen, set fra fodenden, vendes slangetilkoblingen med bogstavet "L" mod teksten "Start side" på pumpen, som vist på (figur 2).

# 2

Pumpen startes og der pumpes til den ønskede løftehøjde er nået (figur 3).

Derefter afkobles slangetilkoblingen (B) fra pumpen (C) (figur 4), og pumpen slukkes.

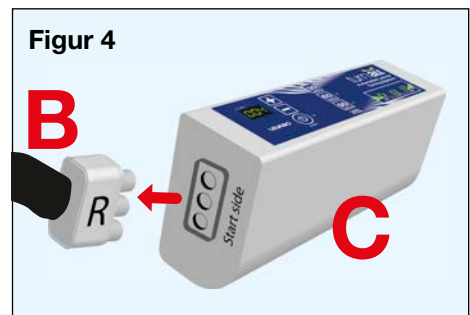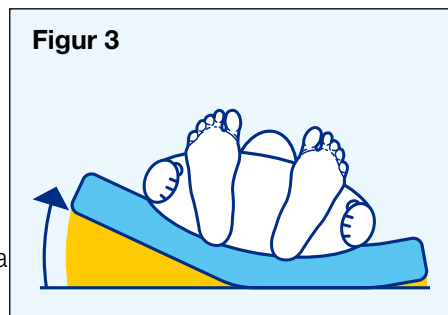


# 3

Slangetilkoblingen (B) lukkes nu med dækslet (E) (figur 5).

Turn All® systemet vil nu blive i denne position (figur 3) indtil dækslet (E) fjernes igen og luften derved automatisk løber ud af systemet.

Check at luftkamrene er fuldstændigt tømt inden du monterer slangetilkoblingen (B) til pumpen (C) igen.

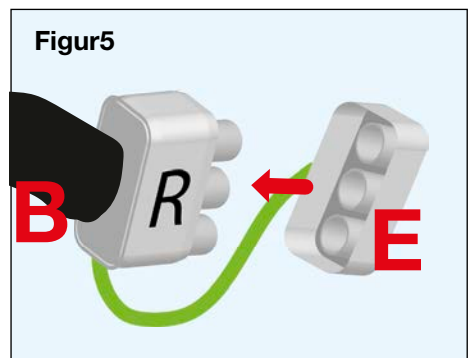

#### Rengøring og desinfektion



For yderligere information  
læs bruger manualen

# 1

Hvis Turn All® systemet skal have rengjort den indre løftemadras (H) figur 1, åbnes lynlåsen i coveret (J) figur 1 og overdelen fjernes.

# 2

Åbn lynlåsen (L) figur 1 og træk tilkoblings-slangerne (B) figur 1-2) gennem åbningen ind i den underste del af coveret.

# 3

Løsn de 6 tryklåse (K) figur 3.

# 4

Inder madrassen (H) figur 4, kan nu fjernes. Den rengjorte madras monteres som vist i omvendt rækkefølge.

#### Turn All® Cover (det blå overtræk)

Den indre løfte-madras skal afmonteres fra Turn All® Cover inden vask.


Turn All® Cover kan vaskes i vaskemaskine v. 95° C. og tørretumbles på lav indstilling.




Turn All® Cover kan rengøres i autoklave v. max. 121° C.

Turn All® Multi Patients-indvendige løftemadras kan rengøres med varmt vand og sæbe. Desinfektion kan udføres med en passende 1% klorbaseret opløsning.


Figur 1

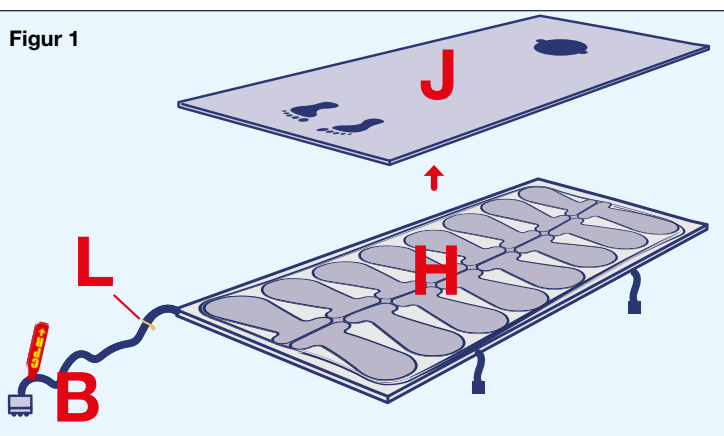

Figur 2

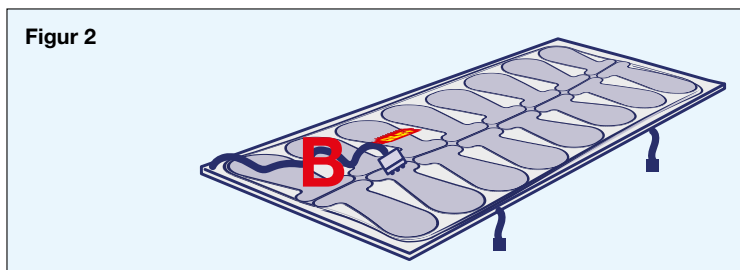

Figur 3

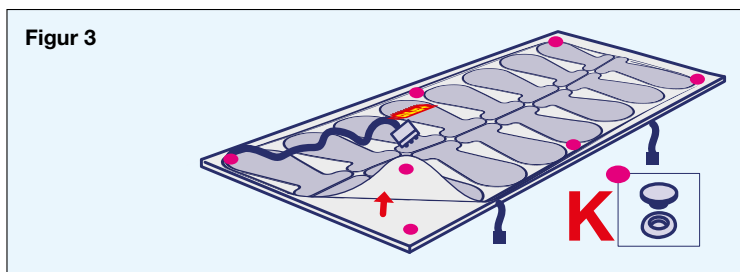

Figur 4

